

PRŮVODCE VÝTĚROVÝM TESTEM

1

Důležité: Provádíte-li stěr z nosní sliznice, je pro relevantní výsledek testu nezbytné v každé nosní dírce tyčinkou 5x otočit.



Stěr z nosní sliznice



Stěr z orofaryngu



Stěr z nasofaryngu


2



Roztrhněte zde

Extrakční roztok
(300 μ l)


Zatavený sáček

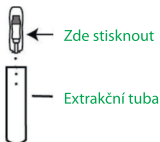

Zde stisknout

Extrakční tuba

3

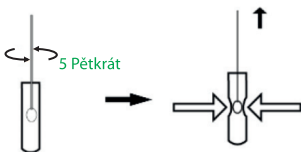


5 Pětkrát

4

Nasadte hrot extrakční tuby.




5

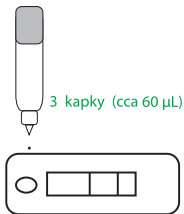


6



15 minut

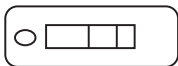

7

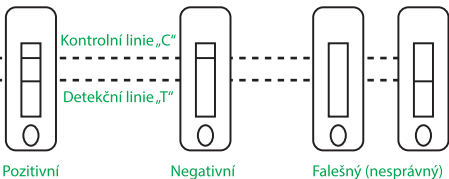

VivaDiagTM